


Teie AiDEX™ pidev glükoosiseiresüsteem (CGM) koosneb järgmistest põhiosadest:

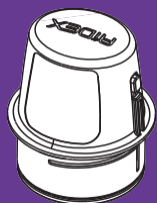

Sisseehitatud andur  
aplikaatoriga



Saatja



Personaalne diabeediassistent (PDA)/APP

## AiDEX™ Pidev glükoosiseiresüsteem Kiirjuhend




CE 0197


MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

### 1 Anduri rakendamine


Seadme ettevalmistamine:

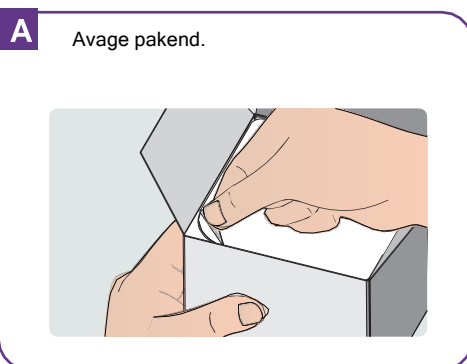

Valige koht:

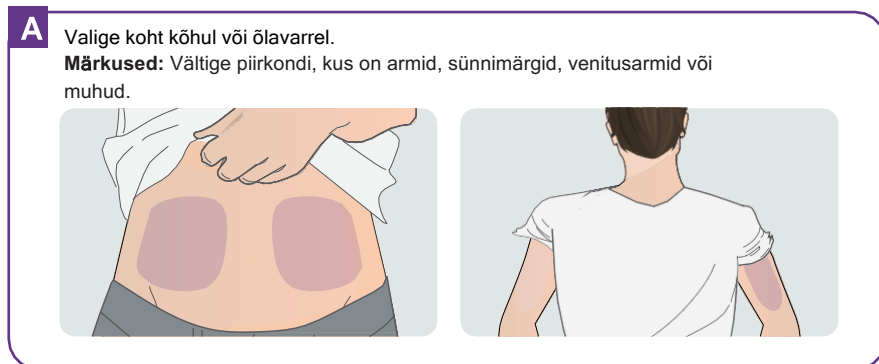


Anduri rakendamine:

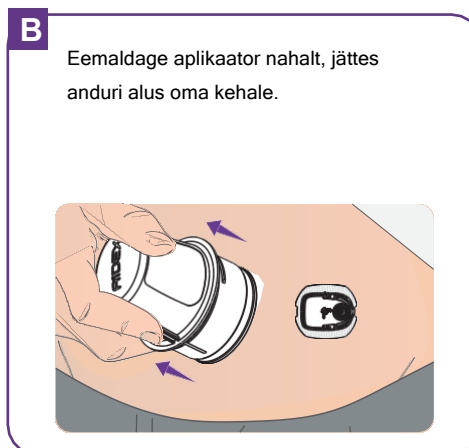


## 2 Saatja kinnitamine

- A** Joondage saatja anduri alusele ja kinnitage see kindlalt.  
**Märkused:** Joondage ja vajutage esmalt saatja ühenduskohale. Seejärel veenduge, et kaugemal asuv kinnituskonks haakub, surudes vajaduse korral seda piirkonda allapoole. Enne kinnitamist veenduge, et saatja ja anduri alus on sarnaselt orienteeritud.

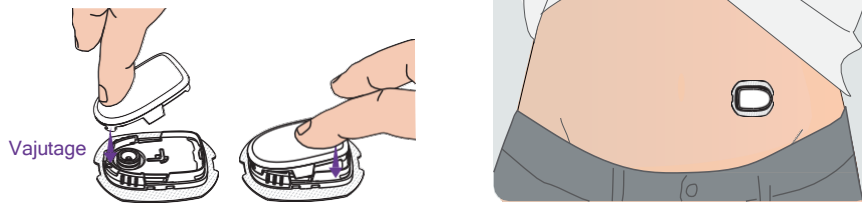


## 3 Anduri käivitamine PDAs/rakenduses

- A** Valige meie personaalne diabeediassistent (PDA):  
Palun vaadake meie kasutusjuhendit PDA seadistuste kohta.

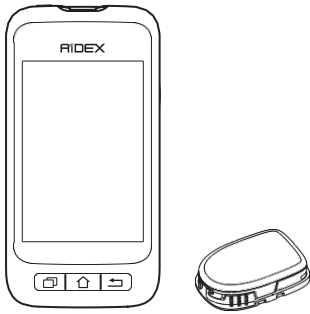


Installige meie rakendus "AiDEX" oma mobiiltelefoni kui vastuvõtjaks. Laadige AiDEX alla QR-koodi abil:

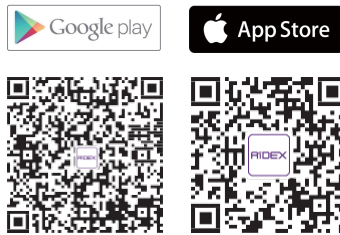


- B** Leidke saatja SN saatekarbil.

© Glucose Monitoring Transmitter  
Model No. : G7-T01  
SN XXXXXX  
yyyy-mm-dd

- C** Ühendage saatja PDA või telefonirakendusega, sisestades saatja SN.

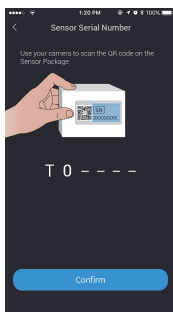

- D** Oodake tund aega, kuni andur soojeneb.

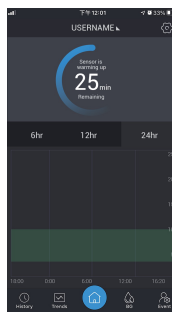


- E** Juurdepääs oma glükoosandmetele PDA või telefonirakenduse kaudu.



## 4 Eemaldage vana andur ja käivitage uus andur


- A** Tõmmake ettevaatlikult teipi, mis hoiab andurit servast kinni. Eemaldage andur aeglaselt, kuni see on täielikult eemaldatud.

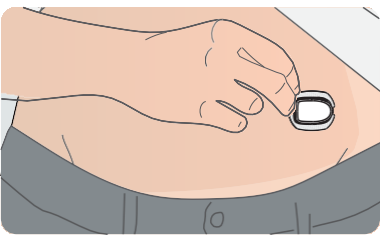

- B** Kasutage sooja seebivett, et eemaldada allesjäänud kleepuvad jäägid.




- C** Vajutage anduri aluse kahele vabastamisnupule, nagu näidatud. Tõmmake saatja anduri alusest eemale.

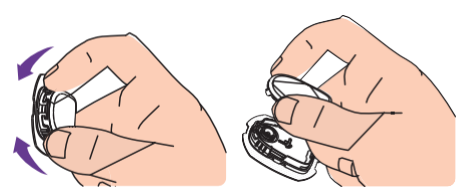


- D** Paigaldage uus andur vastavalt esimeses etapis kirjeldatud protseduuridele.

Etapp 1

- E** Kinnitage, et tegemist on uue anduriga, kasutades PDA-d või telefonirakendust.

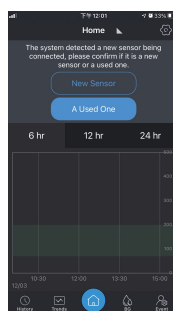

- F** Oodake, kuni andur soojeneb, ja pääsete oma glükoosisisalduse andmetele juurde nagu enne.

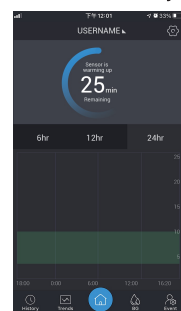

### Märkus:

1. Kui jätkate veel kasutamata anduri kasutamist, ei pea te ootama, kuni andur soojeneb etapis F.
2. Aplikaatorid ja andurid on ühekordsed ja mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Hävitage kasutatud aplikaator ja andur vastavalt kohalikele eeskirjadele. Saatja on korduvkasutatav.